

	<b>MENGUKUR TEKANAN DARAH</b>		
	SOP	No Dokumen : SOP/173/ 2023	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 21/1/2023	
Halaman : 1/2			
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat tensimeter digital		
2. Tujuan	Sebagai acuan langkah – langkah pelaksanaan pengukuran tekanan darah		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/01/404.302.4.19/2023 Tentang Pemeriksaan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Mantingan		
4. Referensi	Petunjuk teknis pelaksanaan posyandu lanjut usia dan posbindu PTM terintegrasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2021		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mencuci tangan dan menggunakan APD</li> <li>2. Petugas memberitahu pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah</li> <li>3. Petugas memasang baterai pada alat tensimeter digital</li> <li>4. Petugas memasang manset pada lengan atas, 1-2 cm diatas garis siku, dengan posisi selang sejajar dengan jari tengah dan posisi tangan terbuka keatas</li> <li>5. Petugas memberitahu pasien untuk duduk tegak dan jangan bergerak,berbicara atau memegang manset</li> <li>6. Petugas menekan tombol start dan menunggu hingga pengukuran selesai</li> <li>7. Petugas mencatat hasil pengukuran yang tertera pada layar. Petugas menekan tombol stop dan melepas manset</li> </ol>		
6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posyandu lansia</li> <li>2. Posbindu PTM</li> <li>3. Ruang Pemeriksaan umum</li> <li>4. Polindes</li> <li>5. Pustu</li> </ol>		

7. Rekaman historis perubahan	No .	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan